


Strongstep®

新型冠状病毒抗原检测试剂盒（乳胶免疫层析法）

取样：最好用植绒拭子（见下图）



1.口咽拭子 2.鼻咽拭子 3.痰（最好是深咳的痰）

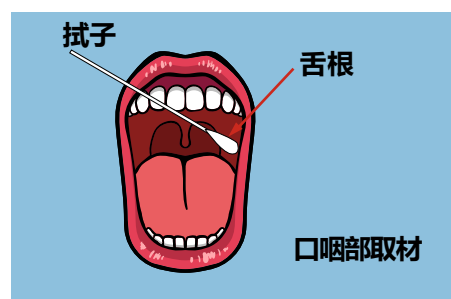



检测过程图示：

加标本处理液20滴（约1mL）
至标本处理管中

将取样拭子搅拌并挤压管壁，
使标本充分洗脱至处理液中

取出检测卡，
向圆孔中加样3滴

等待15分钟，判读结果

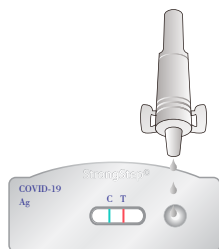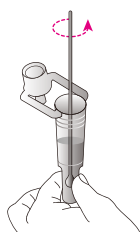

临床意义：

① 抗原检测阳性，具有确诊价值。可进行PCR再次确证。

② 抗原检测阴性，不能完全排除新冠病毒感染的可能性。

由于新型冠状病毒主要侵犯肺泡等下呼吸道，所以，从鼻咽、口咽等上呼吸道取样，不一定能取到病原体，或者取样中所含病毒数量较少，这些因素都可造成漏检（假阴性）。

③ 可结合抗体检测（血标本）结果，综合判断。





LIMING BIO
diagnostics are ASSURED




Strongstep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test


Sampling illustration



- ① Nasopharyngeal swab
- ② Oropharyngeal swabs

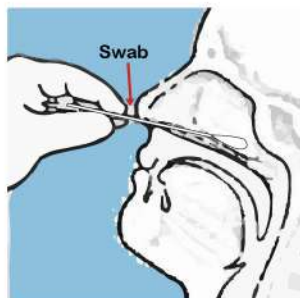

- ③ Sputum
- ④ sputum

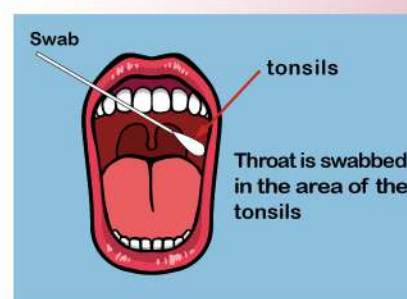

Product package



- Individually Packed Test Devices:20
- Extraction Buffer:2*10ml
- Extraction Tubes:20



Method of operation of kit illustrated

Sample Treatment Solution




Squeeze the tube and rotate the swab 15 times



Remove the test card from the foil bag
Add 3 drops of specimen solution to round sampling hole



Waiting for 15 minutes reading result

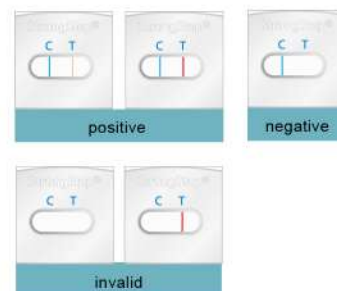

Nina Wang

Add: No.12, Huayuan Road, Nanjing, Jiangsu, China 210042

Whatsapp:0086-13222085621

E-mail: sales@limingbio.com

Web: www.limingbio.com

